

[illegible]

SYMBOLLOGY



Single use | Un solo uso



Use By | Fecha de caducidad

LOT

Lot Number | Número de lote

REF

Reference number | Número de referencia



Caution | Consulte las instrucciones de uso



Consult instructions for use | Atención



Manufacturer | Fabricante



Keep away from sunlight
No exponer a la luz solar Mantener seco



Keep dry | Mantener seco



Do not use if package is damaged
No usar si el paquete está deteriorado

See affixed label for method of sterilization of this device | Ver etiqueta para saber o método de esterilização utilizado neste dispositivo

STERILE R

Sterilized using Irradiation
Esterilizado mediante Irradiación

STERILE EO

Sterilized using Ethylene Oxide
Esterilizado mediante Óxido de etileno

CAUTION: FEDERAL LAW (USA) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE ON OR BY THE ORDER OF A PHYSICIAN.

ATENCIÓN: LA LEY FEDERAL ESTADOUNIDENSE RESTRINGE LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO A LA PRESCRIPCIÓN PREVIA DE UN MÉDICO.

Bone Screws

**FOR USA
ONLY**

INSTRUCTIONS FOR USE

BONE SCREWS

**SOLAMENTE
PARA EEUU**

INSTRUCCIONES DE USO

TORNILLOS ÓSEOS

NOTE: a larger print version of this IFU is available on www.limacorporate.com in the specific product section. Refer to this section for the most updated version of this IFU.

NOTA: una versión más completa de las instrucciones de uso se encuentra disponible en el sitio www.limacorporate.com en la específica sección de productos. Refiera a esta sección para la versión más actualizada de estas instrucciones de uso.



Lima corporate spa

Via Nazionale, 52
33038 Villanova di San Daniele del Friuli
Udine - Italy
t: +39 0432 945511
f: +39 0432 945512
E-mail: info@limacorporate.com
www.limacorporate.com

B.0011.66.000.1



Rev. 0 18/11/2015

[illegible]

